

Premilene® RacePack®

El packaging innovador de suturas de B. Braun



Cierre de heridas

Premilene® RacePack®

El packaging innovador de B. Braun que minimiza el efecto memoria en la sutura

Manejo correcto del packaging RacePack®



Abrir el envoltorio no estéril.
Zona de sujeción amplia.



Transferir el RacePack® a la zona o personal estéril.




Agarrar la aguja directamente con el porta-agujas.

La pestaña trasera flexible facilita el agarre de la aguja.



Extraer la sutura tirando hacia la derecha.

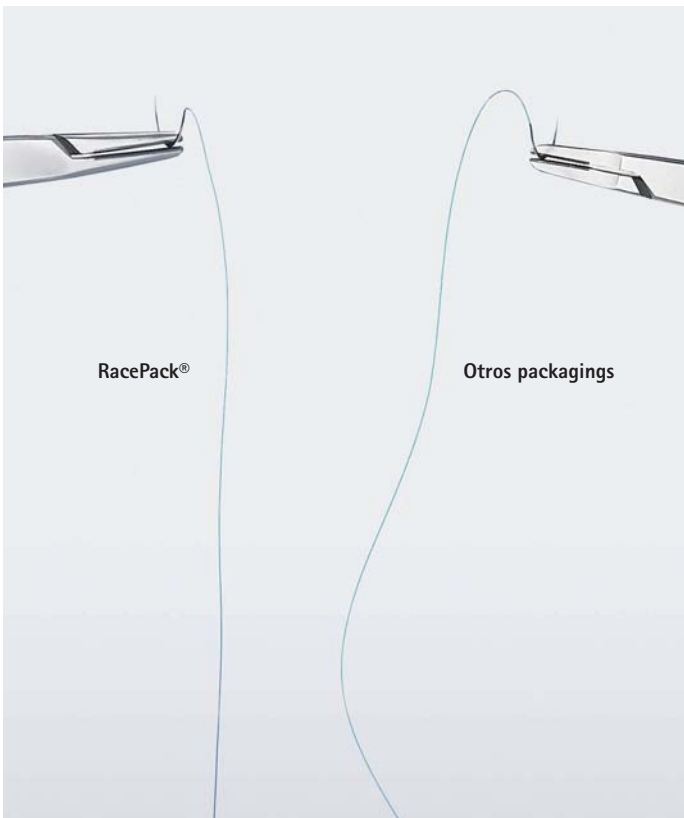

RacePack® minimiza el efecto memoria observado en las suturas monofilamento.

Comparación entre el efecto memoria observado en una sutura monofilamento de 4/0 USP envasada en RacePack® y otra sutura equivalente presentada en packaging convencional.











Premilene®- polipropileno monofilamento

- Resistencia tensil sostenida
- anudado seguro
- alta manejabilidad
- excelente paso a través de los tejidos
- excelente histocompatibilidad.



Premilene®

Combinación aguja-hilo

Aguja longitud mm	Hilo longitud cm color	USP métrico							
		6/0 0.7	5/0 1	4/0 1.5	3/0 2	2/0 3	0 3.5	1 4	2 5
Aguja 1/2 círculo punta cilíndrica									
 HR 26	75 azul			G2090040	G2090041				
 HR 37	75 azul						G2090052	G2090053	
Aguja 1/2 círculo punta triangular									
 HS 26	75 azul				G2090269	G2090270			
 HS 30	75 azul						G2090276		
 HS 40	75 azul							G2090287	
Aguja 3/8 de círculo punta triangular									
 DS 12	45 azul	G2090206	G2090207	G2090208					
 DS 16	45 azul	G2090211	G2090212	G2090213					
 DS 19	75 azul		G2090519	G2090520	G2090521				
 DS 24	75 azul			G2090234	G2090235	G2090236	G2090237	G2090238	
 DS 30	75 azul				G2090246	G2090247			

G Cajas de 12 unidades

