

## Mantenimiento autoclaves

Anotar todas las actuaciones de mantenimiento y reparación

	Operaciones de prueba y mantenimiento	Diariamente	Semanalmente	Mensualmente	Cada 6 meses	Anualmente	Cada 5 años
Por el usuario	Limpiar la junta de la puerta	✓					
	Limpiar las bandejas y el soporte		✓				
	Limpiar el sistema con Chamber Brite o con limpiador para autoclaves con vacío (según aplique)		✓				
	Engrasar bisagras de las puertas		✓				
	Limpiar la superficie externa del autoclave		✓				
	Reemplazar agua en equipos con depósito único (semanalmente o cada 20 ciclos)		✓				
	Limpiar los electrodos de nivel de agua		✓				
	Limpiar el filtro de agua			✓			
	Limpiar la rejilla de la caja electrónica				✓		
	Comprobar la válvula de seguridad			✓			
Pro el técnico	Reemplazar el filtro de aire				✓		
	Comprobar la junta de la puerta					✓	
	<b>Comprobar y ajustar las juntas de las tuberías</b>					✓	
	Apretar tornillos					✓	
	Comprobar conexión a tierra					✓	
	<b>Validación</b>					✓	
	Comprobación del relé diferencial					✓	
	Comprobar nivelación del equipo					✓	
	Comprobar válvulas					✓	
	Comprobar termostatos					✓	
	Comprobar desgaste del dispositivo de bloqueo					✓	
	Verificar los parámetros de ciclo					✓	
	Comprobación de la integridad del depósito de agua, tuberías, piezas de plástico y el cableado eléctrico					✓	
	Comprobar desgaste del tornillo de bloqueo						✓
	Comprobar calibración de la presión y la temperatura					✓	

