

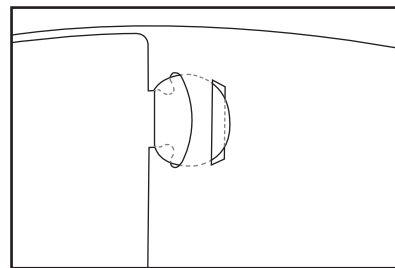
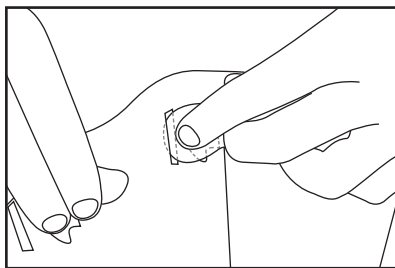
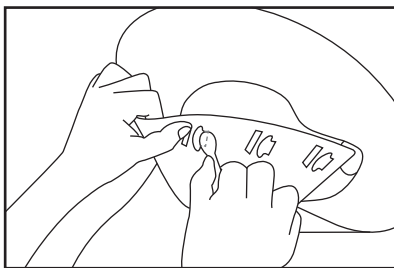
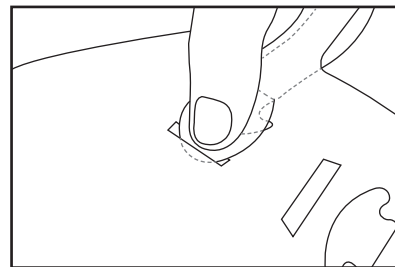


# Instrucciones para la colocación del collar Collclick®

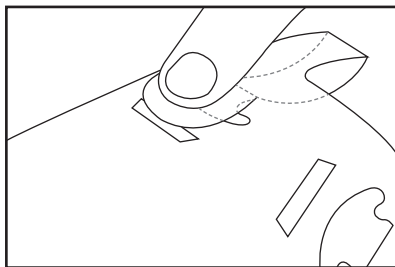

- Montar el collar con las pestañas laterales de FUERA hacia DENTRO y que se oiga el "click" de su anclaje.
- Posteriormente pasar la pestaña por el anclaje de seguridad como muestra la ilustración.

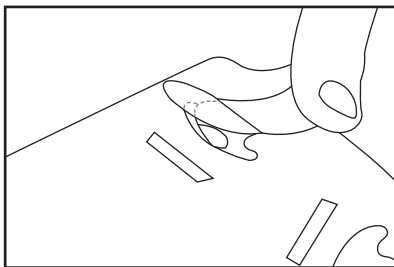

- Introducir las lengüetas de la zona del cuello de DENTRO hacia FUERA hasta que entren en su totalidad y se oiga el "click" de su anclaje.
- Posteriormente pasar la lengüeta por el anclaje de seguridad como muestra la ilustración.

\* Se recomienda la eliminación de las piezas de plástico de los agujeros que no se utilicen para evitar su ingestión accidental por niños o mascotas.

**B | BRAUN**  
SHARING EXPERTISE

B. Braun VetCare S.A.