



# Guía rápida Askina® para el manejo de heridas

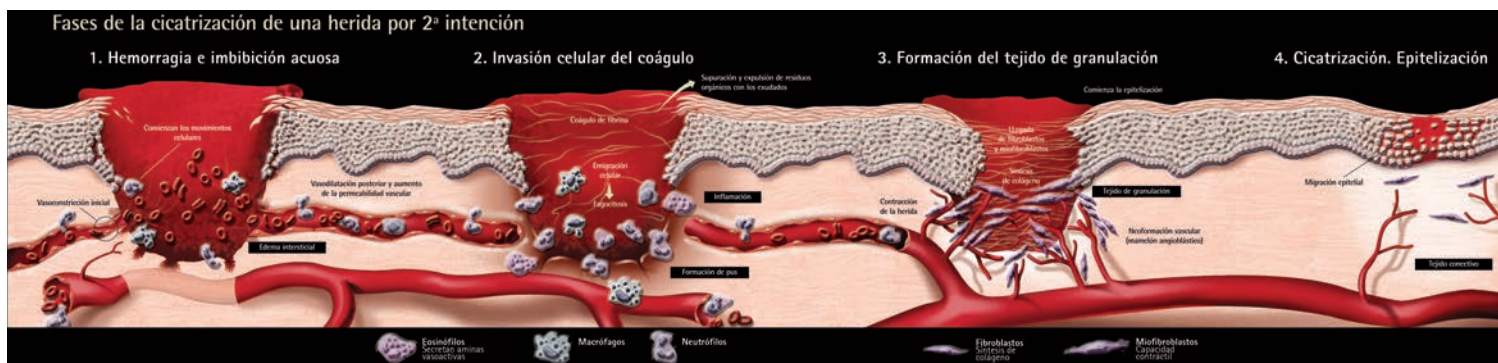

# Protocolo de manejo de heridas

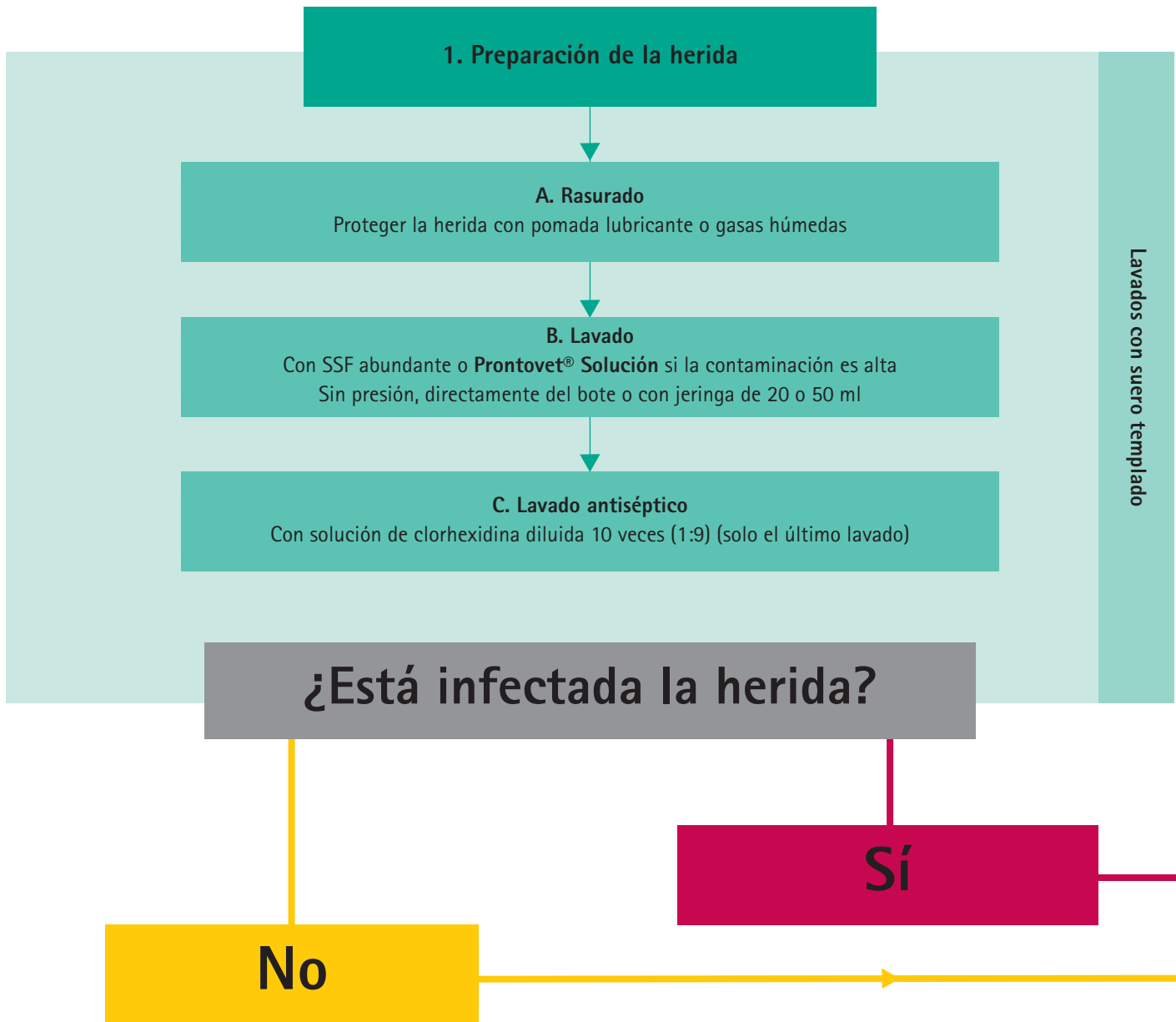

## 2. Herida infectada

### A. Desbridamiento

Quirúrgico: bisturí, tijeras  
Mecánico: SSF a baja presión con jeringa de 20 ml y aguja de 20G  
En heridas altamente contaminadas: mecánico – **Prontovet® Solución** a baja presión

### B. Primera cura y segunda cura (cada 12 horas)

1. Hidrogel (**Askina® Gel**)/**Prontovet Gel®** (en función de material de desecho)
2. Triple antibiótico
3. Esponja poliuretano (**Askina® Transorbent**), si exuda mucho alginato (**Askina® Sorb**)
4. Venda cohesiva roja\* o malla

### C. Sigüientes curas (cada 24 horas)

1. Extracto de centella asiática
2. Triple antibiótico, hasta el 5º día
3. Esponja de poliuretano (**Askina® Transorbent**), controlar exudado
4. Venda cohesiva roja\* (**Askina® Haft**) o malla

Mantener tratamiento hasta controlar infección


Lavados con suero templado

# Askina®

\*Código de colores para diferenciar externamente si se trata de una herida infectada o no.

‡ Protocolo elaborado en colaboración con el Dr. Joaquín Sopena (Universidad CEU Cardenal Herrera, Valencia)



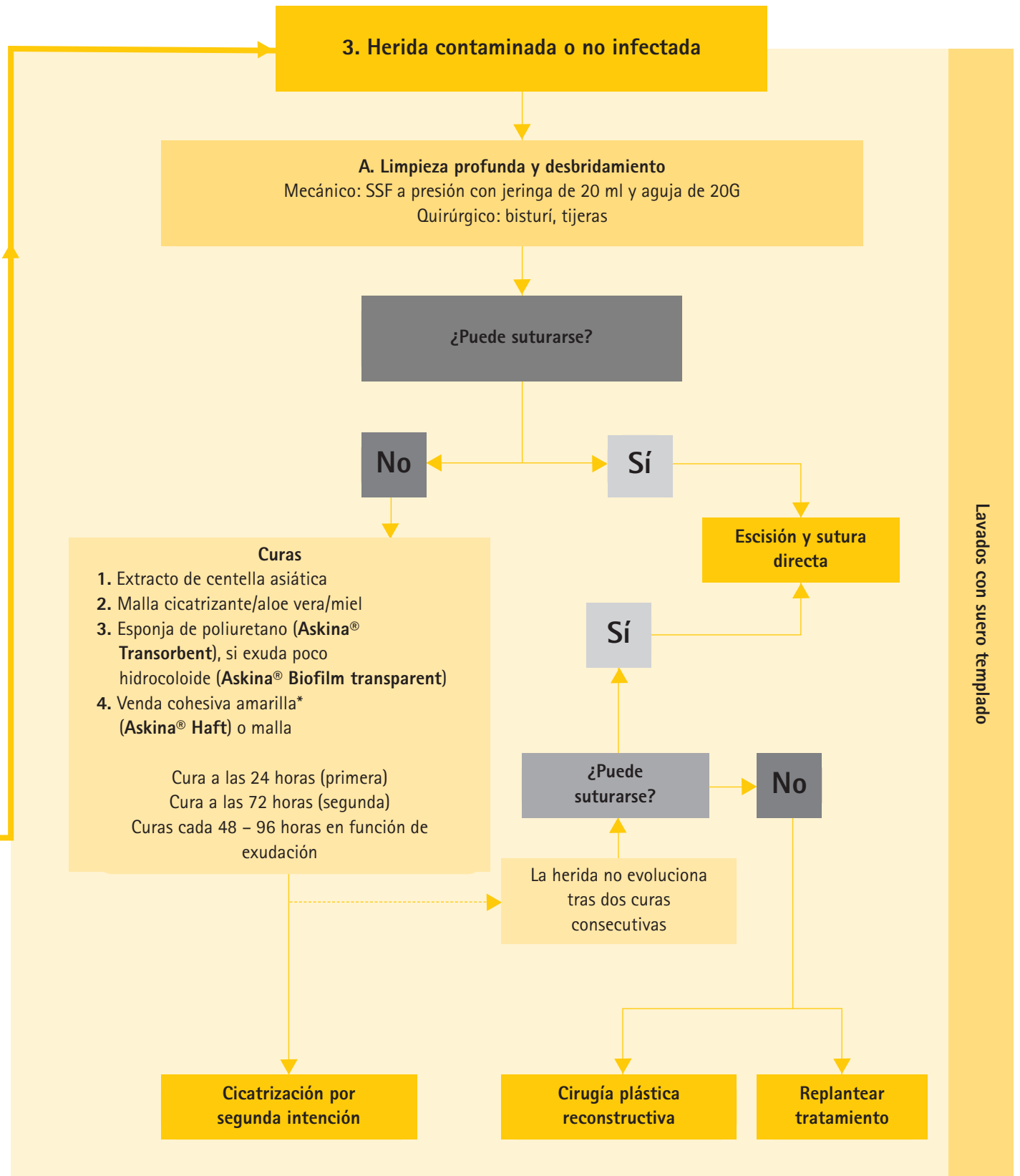

# Gama Askina® y ProntoVet

La solución completa para el cuidado de heridas



## ProntoVet Solución

Solución de irrigación para el lavado y descontaminación de heridas

- Alta eficacia limpiadora.
- Elimina los malos olores.
- Estimula la cicatrización.
- Contiene polihexanida y betaína.
- Penetra y disuelve el biofilm bacteriano y las coberturas de fibrina.
- Facilita el cambio de apósitos resacos o pegados a la herida.



## ProntoVet Gel

Gel para la limpieza y descontaminación de heridas

- Permanece en la herida.
- Aplicable de forma directa, mediante gasas empapadas o con jeringas en el caso de fístulas o lesiones cavitadas.
- Limpia y descontamina la herida.
- Crea las condiciones óptimas para la correcta cicatrización.



## Askina® Gel

Hidrogel incoloro, translúcido y estéril

- Desbridante autolítico de lesiones necróticas.
- Mantiene la humedad en el entorno de la lesión.
- Especialmente indicado en lesiones necróticas.

**Indicaciones:** necrosis, esfacelos y heridas ligeramente exudativas.



## Askina® Pad

Apósito no adherente estéril

- Apósito de algodón estéril altamente absorbente.
- Recubrimiento de teflón antiadherente.

**Indicaciones:** Heridas ligeramente exudativas.




## Askina® Sorb

Apósito de alginato cálcico e hidrocoloide

- Absorción del exudado.
- Estéril, no adhesivo.
- Asociar con Askina® Transorbent® como apósito secundario de retención.

**Indicaciones:** heridas altamente exudativas.

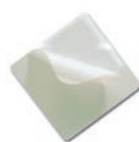

## Askina® Biofilm® Transparent

Apósito hidrocoloide autoadhesivo estéril, transparente y extrafino

- Permeable al intercambio gaseoso e impermeable a las bacterias y al agua.
- No se adhiere a la lesión.
- Extrafino y moldeable.

**Indicaciones:** heridas ligeramente exudativas en las que sea necesaria una visualización directa.



## Askina® Transorbent®

Apósito hidrocélular de poliuretano estéril y flexible

- Impermeable al agua y microorganismos y permeable al vapor de agua e intercambio gaseoso.
- Alta capacidad de absorción: retira el exceso de exudado de la herida.
- La capa central de espuma de poliéster absorbe exudados evitando la formación de costras.
- No se adhiere a la herida.
- Permanencia hasta 7 días.

**Indicaciones:** heridas de moderada o alta exudación.




## Askina® Haft Color

Venda elástica cohesiva hipoalergénica

- 75% de elasticidad longitudinal.
- 40% algodón y 60% poliamida.
- Alta adhesividad.
- Autoclavable.

Nivel de exudado

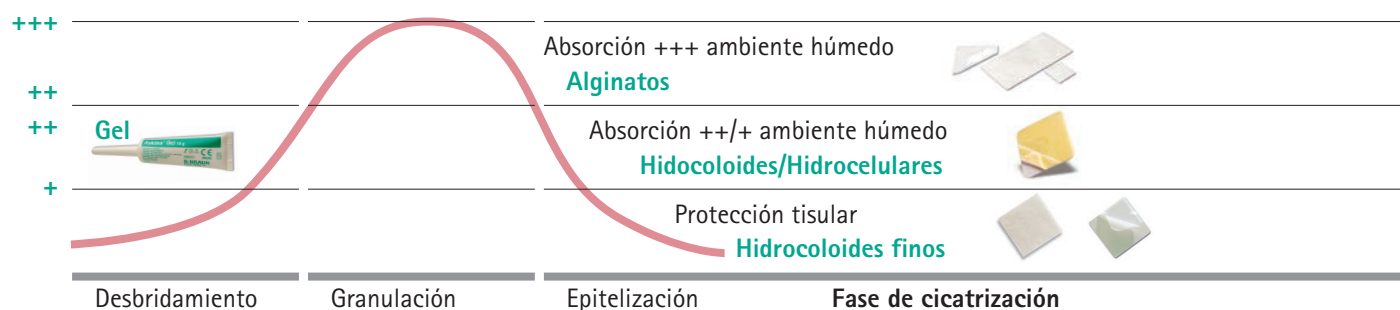

Producto	Color	Referencia	Medidas	Unidad de venta
<b>ProntoVet</b>				
ProntoVet Solución		400601	350 ml	10
ProntoVet Gel		400600	30 ml	"
<b>Askina® Gel</b>				
		001419SES	15 g	5
<b>Askina® Transorbent®</b>				
		0072783R	5x7 cm	3
		0072787U	10x10 cm	3
		0072793V	15x15 cm	3
		0072791W	20x20 cm	5
<b>Askina® Biofilm® Transparent</b>				
		F72093	5x20 cm	3
		F72094	10x10 cm	3
		F72096	15x15 cm	3
		F72092	20x20 cm	5
<b>Askina® Sorb</b>				
		2109S	6x6 cm	3
		2107S	10x10 cm	3
		2108S	15x15 cm	3
<b>Askina® Pad</b>				
		9024018	5x5 cm	100
		9024034	10x10 cm	100
		9024042	10x20 cm	100
<b>Askina® Haft Color</b>				
	Amarillo	9058257	8 cmx20 m	1
	Amarillo	9058249	6 cmx20 m	1
	Rosa	9058230	8 cmx20 m	1
	Rosa	9058222	6 cmx20 m	1
	Azul	9058214	8 cmx20 m	1
	Azul	9058203	6 cmx20 m	1