




# LOBECTOMÍA PULMONAR CON GRAPADORA LINEAL

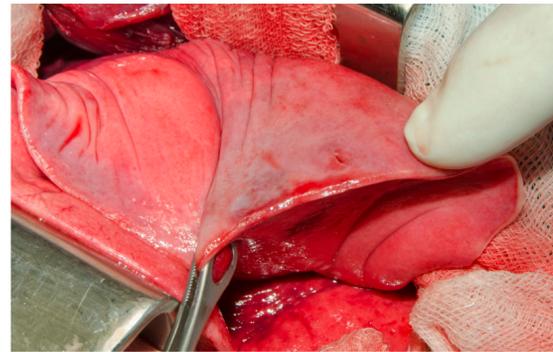


1. Identificación de la lesión y disección de la zona que se va a grapar

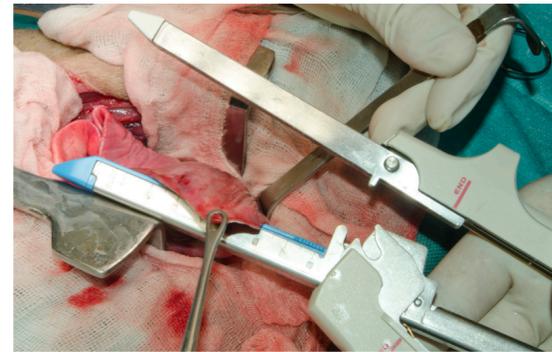


2. Se elige el tamaño de grapa correcto para el grosor del tejido

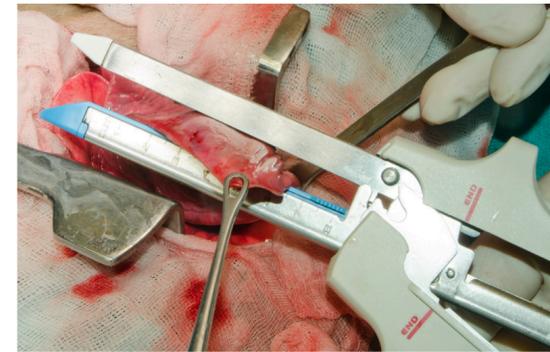


3. Se colocan las ramas de la grapadora sobre el tejido

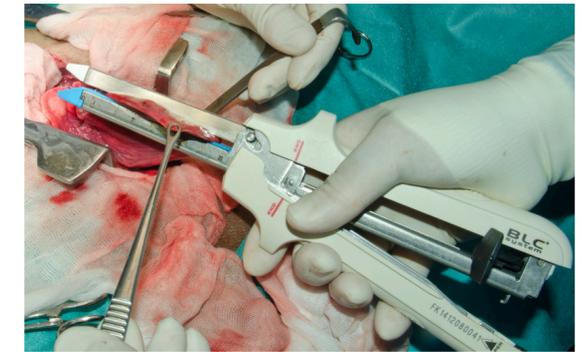


4. Se cierra la grapadora y se esperan unos segundos para que el tejido se adapte al instrumento

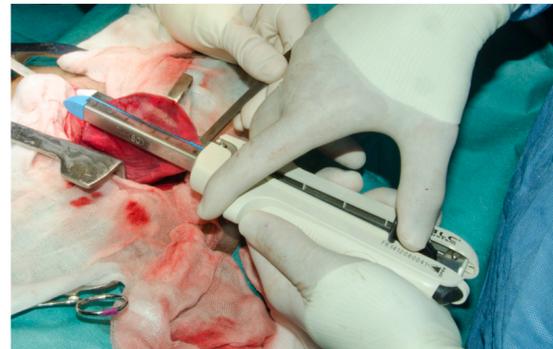


5. Tras 15-20 segundos de espera, se acciona el gatillo

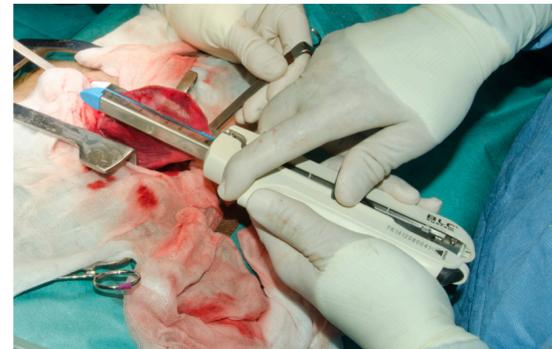

6. La grapadora se sujeta con firmeza mientras se desliza el gatillo

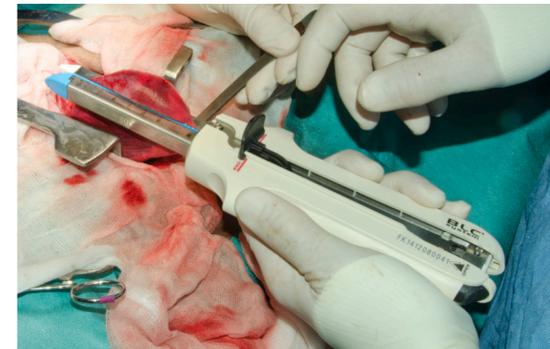

7. El gatillo se desliza hasta la marca para asegurar el grapado y sección en toda la longitud de la grapadora

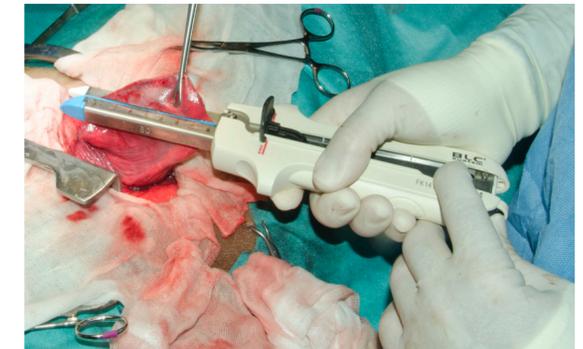


8. El gatillo se desliza a su posición original para poder abrir la grapadora



9. Al abrir la grapadora el tejido circundante se manipula con delicadeza



10. La grapadora se retira con precaución para no lesionar el tejido sobre el que se aplicó

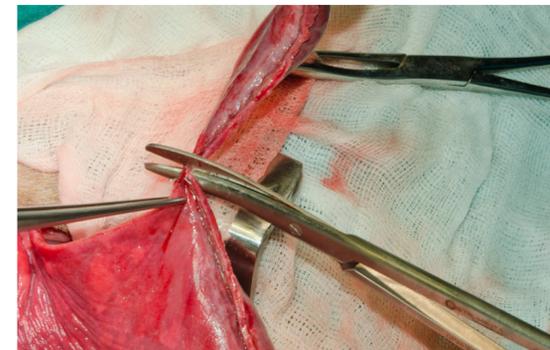

11. Si la parte final de la zona de grapado no se seccionó se corta con tijeras por la línea media



12. Tras el grapado se comprueba la correcta hemostasia y la hermeticidad de la superficie seccionada

Realizado por: Dr. Jorge Llinás, Dr. Roberto Bussadori y Dr. José Rodríguez. Hospital Veterinario Valencia Sur