

Limpieza y esterilización instrumental quirúrgico

AESCLAP®







Limpieza y esterilización instrumental quirúrgico

ANTES DE EMPEZAR:

- Limpiar el instrumental inmediatamente después de su uso.
- No dejar en remojo.

1 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN


- Introducir el instrumental en una solución de limpieza y desinfección adecuada y recién preparada de forma que todas las superficies, cavidades, lúmenes y oberturas queden en contacto con la solución. Seguir siempre las instrucciones de la etiqueta del producto respecto a temperatura, concentración y tiempo de aplicación.
- Después de la desinfección química, aclarar siempre con agua corriente limpia.
- Eliminar los restos de suciedad e incrustaciones con un cepillo de cerdas blandas. No utilizar nunca estropajos ni cepillos de metal.
- Colocar los instrumentos articulados siempre abiertos
- Limpiar los lúmenes y conductos con cepillos redondos de cerdas blandas.

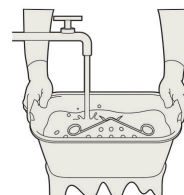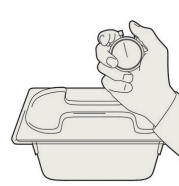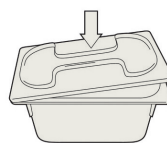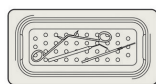

2 LUBRICACIÓN

- Rocíar las partes móviles (articulaciones y zonas de trabajo del material) con aceite lubricante permeable al vapor de agua. De esta forma se mejora la funcionalidad y se alarga la vida útil de los instrumentos.
- Después de cada proceso de limpieza/desinfección chequear el instrumental. Comprobar que está limpio, funciona apropiadamente y no sufre ningún daño (doblado, roto o desgastado). Separar los instrumentos corroidos de los que estén en buen estado.
- Colocar los instrumentos delicados o material de microcirugía en una cesta de esterilización adecuada o con una esterilla de silicona para evitar que se dañen.

Aceite lubricante permeable al vapor

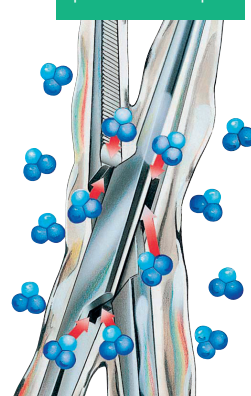

3 ESTERILIZACIÓN

Se recomienda el uso de contenedores estériles Aesculap® por:

- **Eficacia:** protegen el instrumental y garantizan su esterilidad por un mínimo de 6 meses.
- **Economía:** ahorran tiempo de manipulación y preparación de paquetes estériles.
- **Sostenibilidad:** evitan los kilos de residuos de plástico y papel asociados al uso de bolsas de esterilización.



Descarga el Manual de Higiene B. Braun VetCare para una información ampliada sobre la limpieza, mantenimiento y esterilización del Instrumental Aesculap®



Para una correcta limpieza es importante que el lumen y el cepillo tengan el mismo diámetro.

- Se recomienda realizar el aclarado final con agua destilada o desionizada.
- Secar completamente los instrumentos con un paño absorbente, suave y sin pelusa.
- Los conductos y lúmenes es recomendable secarlos utilizando una fuente de aire comprimido.



Helizyme® Detergente enzimático

Diluir al 1% (10 ml de Helizyme® en 1 litro de agua templada) y dejar actuar durante un mínimo de 5 minutos.



18557	Helizyme 1l
18767	Helizyme 5l

Ideal para limpieza por ultrasonidos

Stabimed® Fresh Detergente desinfectante

Diluir al 2% (20 ml de Stabimed® en 1 litro de agua templada) y dejar actuar durante 15 minutos.



19689	Stabimed Fresh 1l
19690	Stabimed Fresh 5l




Sterilit Aesculap® Aceite instrumental

JG598	Aceite instrumental STERILIT AESCULAP 50ml
-------	--



Sterilit Aesculap® Aceite instrumental spray

JG600	Aceite instrumental spray STERILIT AESCULAP 300ml
-------	---

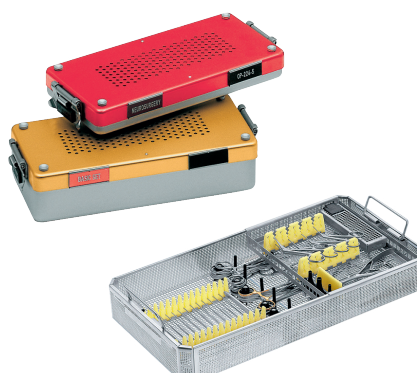

5'



134°



2 bar

Servicio consultoría instrumental AESCULAP®


Calidad y durabilidad

Un instrumental quirúrgico en buen estado es clave para realizar cirugías de éxito.

Consulta cómo, desde **B. Braun**, te podemos ayudar a revisar, mantener, reparar o renovar tus sets de instrumental.



SOLICITA MÁS INFORMACIÓN SOBRE
EL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE
INSTRUMENTAL AQUÍ →

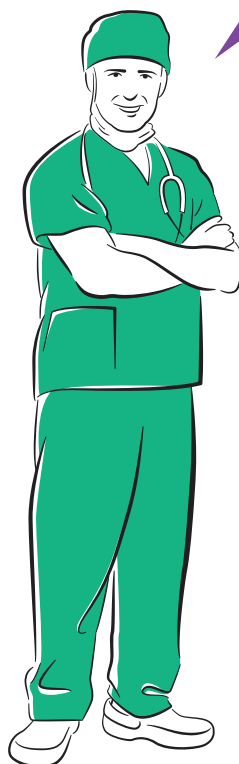

B. Braun VetCare, S.A.U. | Ctra. de Terrassa, 121 | 08191 Rubí (Barcelona)
Servicio Atención Clientes | Teléfono 935 65 61 65 | Fax 935 86 22 04
atencioncliente.vetcare@bbraun.com | www.bbraun-vetcare.es

AESCULAP® - a B. Braun brand



MVET0438CAB
12/25