

# OMNIFLUSH® CON SWABCAP®


Ahora la jeringa precargada es la primera línea de defensa contra las infecciones.




**Omniflush® con SwabCap®**  
Jeringa Precargada con tapón de desinfección integrado

## SwabCap®


Tapón de desinfección con Alcohol Isopropílico al 70% para conexiones Luer

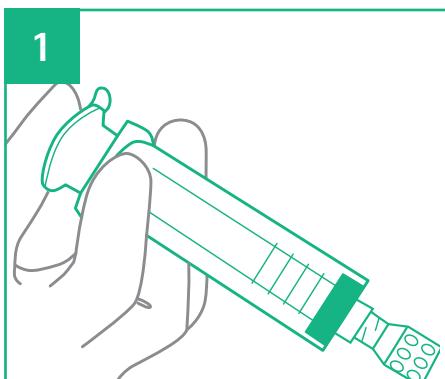


1  
Desechable y para uso aséptico.  
Realice el lavado del catéter con el volume apropiado, de acuerdo a su protocolo.

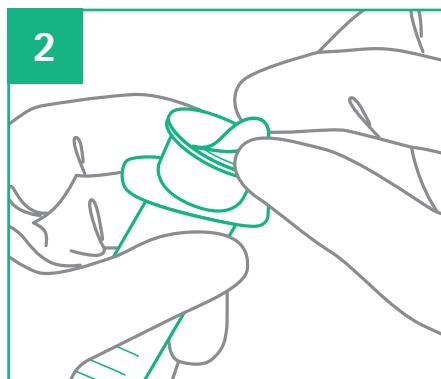


2  
Sostenga con firmeza el émbolo y retire la lámina protectora del tapón Swabcap sin retirarlo de la jeringa.

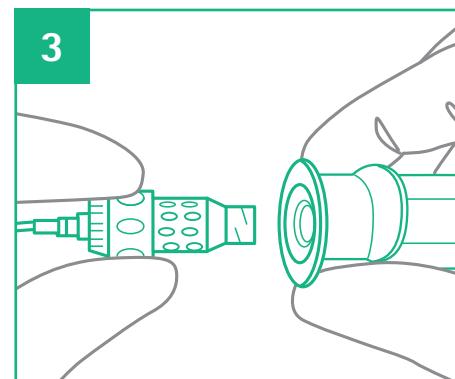


3  
Gire la jeringa para que el extremo posterior quede de cara a la válvula sin aguja.

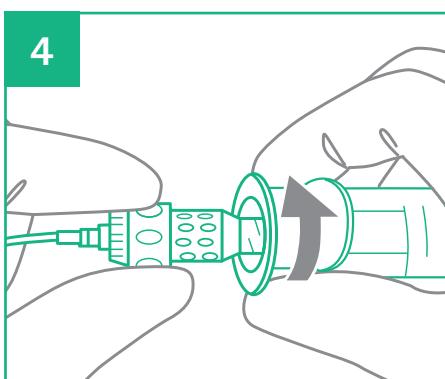

4  
Coloque el tapón girando a la derecha hasta que quede ajustado completamente.

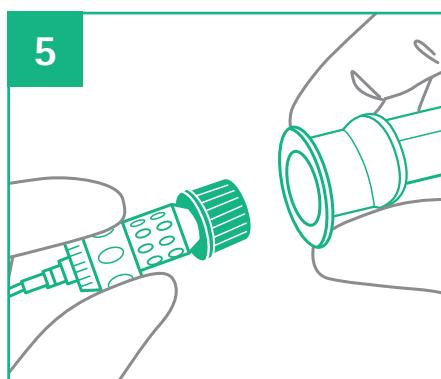

5  
Una vez colocado el tapón, tire suavemente hacia atrás y retire la jeringa.

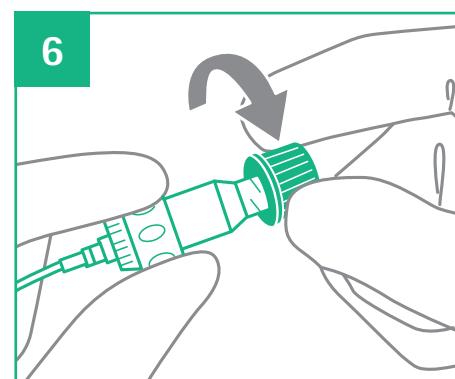

6  
Para retirarlo, antes del uso de la válvula sin aguja, simplemente gire a la izquierda.

# OMNIFLUSH® CON SWABCAP®


Ahora la jeringa precargada es la primera línea de defensa contra las infecciones.




1  
Verifique que el envoltorio del producto esté íntegro.




2  
Abra el envoltorio desde el extremo superior, utilizando el Sistema "Abre fácil".

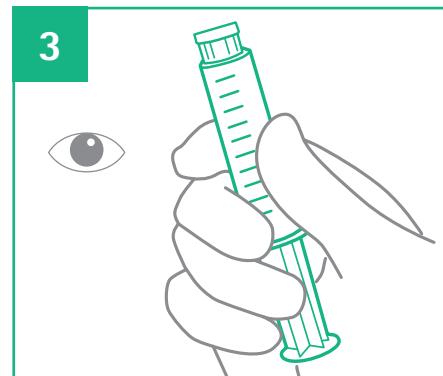


3  
Realice la inspección visual del contenido. El suero fisiológico debe ser transparente, incoloro y no debe observar partículas.

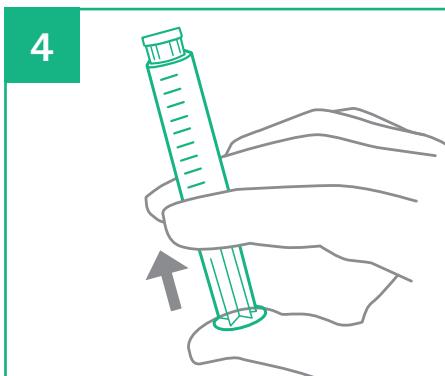


4  
Coloque la jeringa con el cono hacia arriba y elimine el aire.

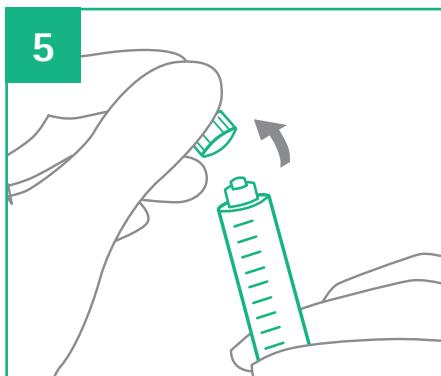

5  
Retire el tapón protector.

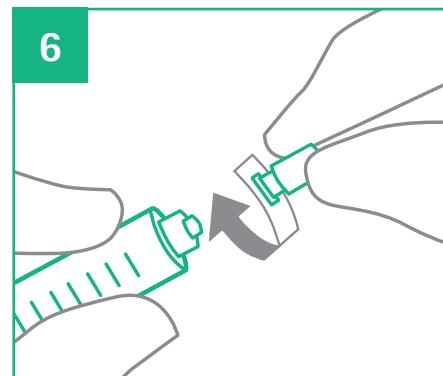

6  
Conecte la jeringa a la válvula sin aguja girando a la derecha.

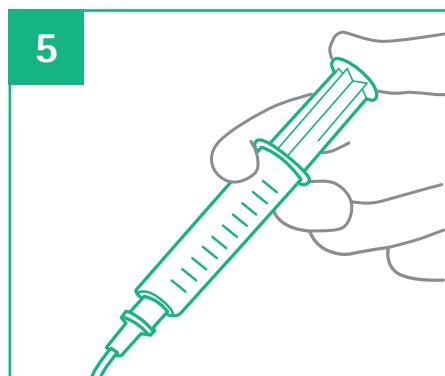

5  
Infunda la solución de lavado presionando el émbolo.



6  
Deseche de acuerdo a las normas y protocolo de la institución.