

Meliseptol® Foam pure

Desinfectante de ámbito sanitario

Meliseptol® Foam pure es un desinfectante alcohólico para productos sanitarios y equipos médicos con excelente compatibilidad con todo tipo de materiales, incluso aquellos sensibles al alcohol.

CARACTERÍSTICAS

- Rápido y efectivo en **1 minuto**.
- Con propiedades detergentes y desinfectantes.
- Excelente compatibilidad con todo tipo de materiales.
- Bajo contenido en alcohol.
- No deja residuos en las superficies.
- Ideal para su uso en combinación con B. Braun Eco Wipes.

INDICACIONES

- Especialmente indicado para la desinfección de material sanitario y equipos médicos como equipamiento quirúrgico, aparatos de ultrasonidos, bombas de infusión, incubadoras o camas de hospital.
- Posee una excelente compatibilidad con todo tipo de materiales, incluidos aquellos sensibles al alcohol como plástico acrílico y pruebas de ultrasonido.
- No contiene aldehídos ni alquilaminas y es un excepcional producto multiusos con aroma agradable y discreto.

COMPOSICIÓN

100 g de solución contienen:

17 g 1-propanol, 0,23 g de cloruro de didecildimetilamonio.
Excipientes: <5% surfactantes no iónicos, agua purificada.

DATOS FÍSICO-QUÍMICOS

- Apariencia: líquido transparente e incoloro.
- Densidad (20 °C): ~0,98 g/ml.
- Punto de inflamación: +31,5 °C.
- pH: ~7.

EFICACIA MICROBIOLÓGICA

Meliseptol® Foam pure es efectivo frente:

- Bacterias (inc. TbB) y hongos (incl. C. albicans).
- Virus envueltos: Gripe A, VHC, VHB, VIH, Vaccinavirus.
- Virus no envueltos: Norovirus, Poliomavirus y Rotavirus.

MICROORGANISMO	TEST
Desinfección de superficies: Bacterias, lavaduras, hongos (C. albicans), virus con envuelta (incl. VHB, VHC, VIH, Vaccinavirus, BVDV) Rotavirus	DGHM/VAH 09/2001 EN 1040 EN 1275 EN 1276 EN 13727 EN 13697 EN 14476
Hongos (A. brasiliensis)	EN 13624
Micobacterias (M. Terra)	EN 14348 EN14563
Virus de la gripe A	DVV/RKI EN 14476
Rotavirus	DVV/RKI
Norovirus (MNV)	EN 14476
Poliomavirus	DVV/RKI

DOSIFICACIÓN E INSTRUCCIONES DE USO

- Usar guantes. Los aparatos médicos deben desconectarse antes de su desinfección. Si no es posible, deben tomarse precauciones para asegurarse que el aparato no se pondrá en marcha mientras se lleva a cabo la desinfección.
- Limpiar la superficie a desinfectar con una toallita o paño de un solo uso impregnado con **Meliseptol® Foam pure** y dejar secar. Esperar a que el tiempo de contacto haya transcurrido. No rociar directamente en las aperturas de los dispositivos médicos. No aclarar. Dejar secar completamente.

INFORMACIÓN DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

B. Braun está certificado acorde:

- DIN EN ISO 9001 sistema de gestión de calidad.
- DIN EN ISO 13485 proporcionar dispositivos médicos y servicios relacionados que cumplan consistentemente los requisitos del cliente y los requisitos reglamentarios aplicables a los productos sanitarios y servicios relacionados.
- DIN EN ISO 14001 sistema de gestión medioambiental.
- DIN EN ISO 50001 sistema de gestión energética.
- OHSAS 18801 sistema de gestión de salud ocupacional y seguridad.
- El sitio de producción Sempach dispone de certificado GMP (Producción Farmacéutica).

ALMACENAMIENTO

- Proteger de la luz solar.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Inflamable.
- Mantener alejado de las fuentes de ignición.
- Fecha de caducidad: 2 años.

Marcado CE Clase IIA



PRODUCTO	CÓD. B. BRAUN
Meliseptol® Foam pure 750 ml	19796
Meliseptol® toallitas dispensador	18706
Meliseptol® recambio toallitas	18707