

### Consideración

- Paciente
- Motivo de uso
- Zona
- Terapia
- Obstrucción



### Colocación

- Preparación de la piel
- Manos limpias
- Bisel hacia arriba
- Ángulo de inserción
- Vena estable
- Flash-back
- Colocación segura



### Factores de riesgo

- Dosificación inadecuada
- Obstrucción
- Flebitis
- Golpe en la pierna
- Infección
- Duración colocación
- Complicación por pinchazo de aguja (paciente y personal)



Calibre	Código de color	Diám. ext. mm	Tam. vena mm	Longitud mm	Flujo ml/min
24G	Amarillo	0.7	1.4	19	22



Para usar en:



22G	Azul	0.9	1.8	25	35
-----	------	-----	-----	----	----



Para usar en:



Administración de fluidos subcutáneos

20G	Rosa	1.1	2.2	32	60
-----	------	-----	-----	----	----



Para usar en:



Terapia de fluidos de choque

18G	Verde	1.3	2.6	32/45	105
-----	-------	-----	-----	-------	-----



Para usar en:



Reanimación con líquidos de alto volumen

16G	Gris	1.8	3.6	50	210
-----	------	-----	-----	----	-----



Para usar en:



14G	Naranja	2.2	4.4	50	345
-----	---------	-----	-----	----	-----



Para usar en:

